



COPPER-INSIDE
Masque Chirurgical Antiviral
Réutilisable sans Lavage

Instructions d'utilisation du masque Copper-Inside

- Le masque ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique au cuivre
- Le masque Copper-Inside est à usage personnel.
- Il est double face et peut être utilisé des 2 côtés.
- Avant de l'utiliser, vérifier que le masque ne présente aucune déchirure.
- La barre de nez doit être en haut. Appuyez fermement sur celle-ci pour couvrir le nez. Le masque doit couvrir la bouche et le nez. Il ne doit y avoir aucun espace sur les côtés, autour du nez ou sous le menton.
- Le masque peut être réutilisé plusieurs semaines (les derniers tests indiquent 6 semaines) sans action particulière ni lavage
- Ne pas laver.
- Les taches peuvent être nettoyées en tamponnant doucement avec un linge humide et en laissant sécher.
- Ne pas utiliser de produits détergents. Veiller à ne pas abîmer le tissu en nettoyant.
- Entre 2 utilisations, conservez le masque dans un endroit sec.
- Pendant l'utilisation, si vous ressentez une gêne cutanée, changez de masque ou arrêtez de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le masque est déchiré, délogé ou s'il souffre de dommages physiques sinon l'efficacité de la protection est affectée.
- Ne pas laver, javelliser, repasser ni jeter sur la voie publique.

www.copperinside.fr